


ZSI 100

IMPLANTE DE PENE MALEABLE

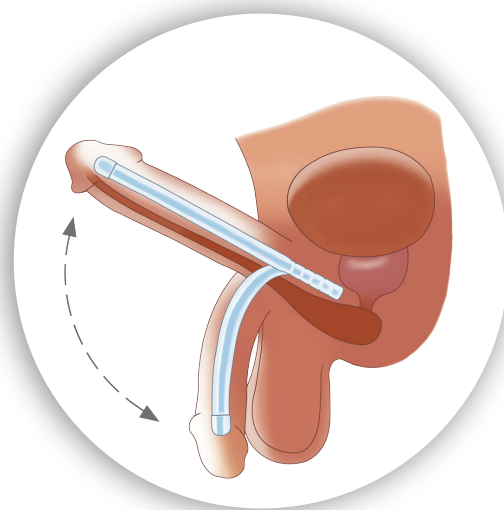

La solución para la disfunción eréctil

- Par de implantes únicos para todos los tamaños.
- más información en: **www.zsimplants.ch**

ZSI es ISO 13485 : 2004 / ZSI 100 está certificado por la UE

Distribuidor Local

ZSI (Zephyr Surgical Implant Sàrl)
C/Ulmann, route des Jeunes 4bis
1227 Les Acacias - Switzerland



Volante, Versión Español
V4, Septiembre 2016




IMPLANTE DE PENE SEMIRRÍGIDO ZSI 100

DISEÑADO PARA OBTENER EXCELENTES RESULTADOS COSMÉTICOS


PRUEBA DE VALOR AGREGADO DE ZSI 100:

Pregunte a su distribuidor local por una demostración de ZSI 100.

Al usar pantalones, el dispositivo tiene una excelente memoria y le brinda comodidad.

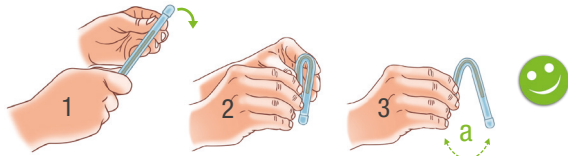


El ZSI 100 tiene buena memoria y permanece en la posición en que lo coloque.

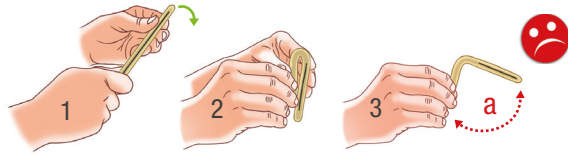


Así se ve un dispositivo que no tiene buena memoria.

La parte distal es flexible y disimula el dispositivo.

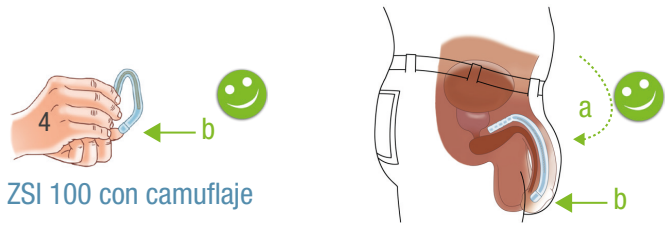


ZSI 100 con camuflaje

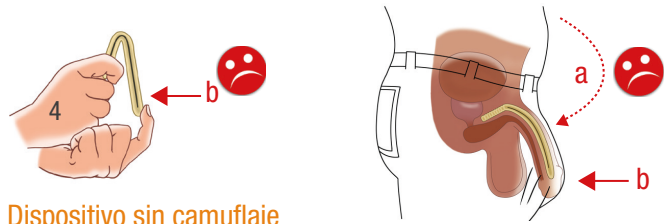

Dispositivo sin camuflaje

Al usar pantalones, la flexibilidad de la parte distal hace que el glande se sienta cómodo.

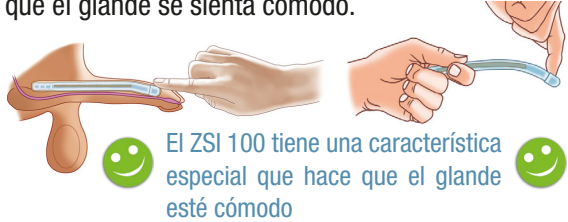


El ZSI 100 tiene una característica especial que hace que el glande esté cómodo



Con este dispositivo, el glande no estará cómodo

La resistencia combinada de 2 cilindros de más de 1 kg tienen la rigidez adecuada para mantener una relación sexual.

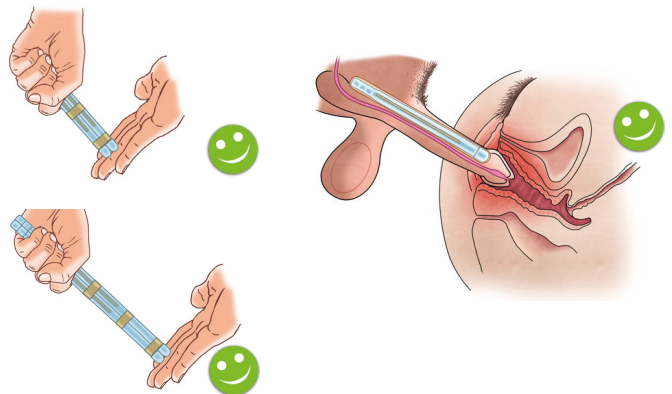

UN PAR DE IMPLANTES DE 11 MM DE DIÁMETRO SE AJUSTA A TODOS LOS TAMAÑOS
LAS PARTES DISTALES Y LAS PARTES PROXIMALES SON AJUSTABLES (ENTRE 12 Y 25 CM) PARA FACILITAR LA REALIZACIÓN DEL IMPLANTE Y ASEGURAR UN MÁXIMO NIVEL DE COMODIDAD PARA EL PACIENTE

PARTE DISTAL

Cada 5 mm
Longitud total = 80mm
Se puede cortar para ajustarla

PARTE CENTRAL

Longitud total = 120 mm
Varilla interior reforzada que se dobla fácilmente

PARTE PROXIMAL


Cada 1 cm
Longitud total = 50 mm
Se puede cortar para ajustarla



- Diámetro estándar de 11 mm para todos los pacientes.
- Hecho de silicón NUSIL para una vida útil más larga.

La varilla interior reforzada es manipulada por el paciente.

El tapón ergonómico se conecta de forma segura con el glande.

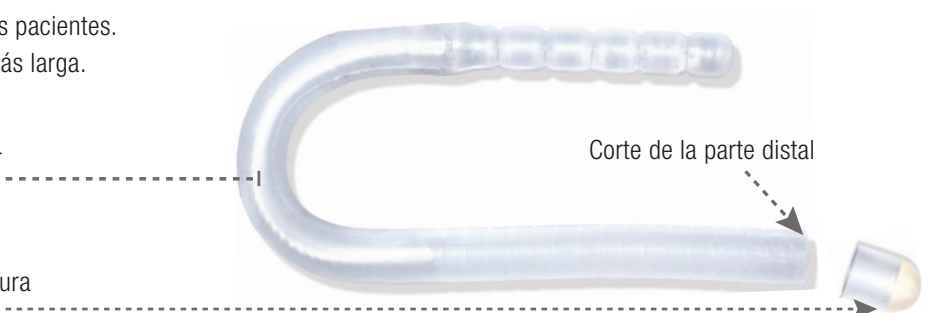

Corte de la parte distal