


## ESTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO AL RADIÓLOGO QUE SE ENCARGARÁ DE REALIZAR LA PLACA DE RAYOS X

### ¿Qué es un esfínter urinario artificial?

El esfínter urinario artificial ZSI 375 es un dispositivo médico que se implanta en el escroto y alrededor de la uretra. Funciona como un esfínter intrínseco.

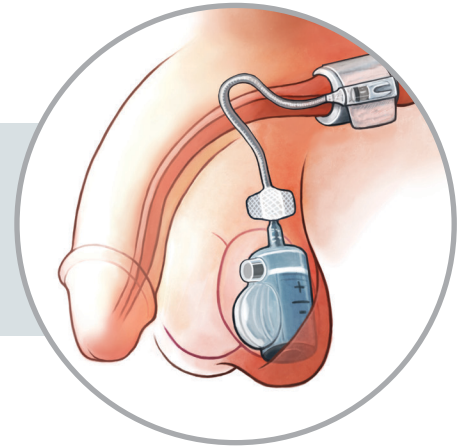

### ¿Qué se debería ver en la placa de rayos X?

Solo necesitamos visualizar un lado de la unidad de la bomba implantada en el escroto.

La bomba debe ser visible en posición vertical/de perfil, tal como se muestra en la siguiente página.

Para esto, no es importante si la bomba es visible de atrás o de lado.




### ¿Qué pasa si no vemos la bomba en posición vertical/de perfil?

Solicítele a un asistente que se encargue de la bomba durante la realización de la placa de rayos X y pídale que la coloque en posición vertical/de perfil.





# Los ángulos en 3D no proporcionan una imagen óptima


**CORRECTO** - El dispositivo está en posición vertical (vista general)

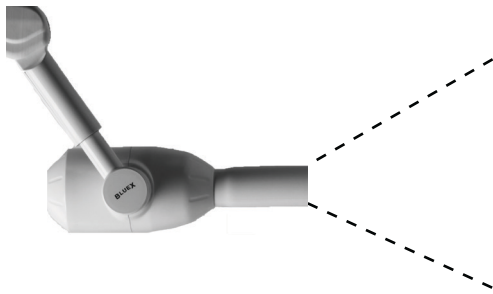

**INCORRECTO** - El dispositivo está inclinado

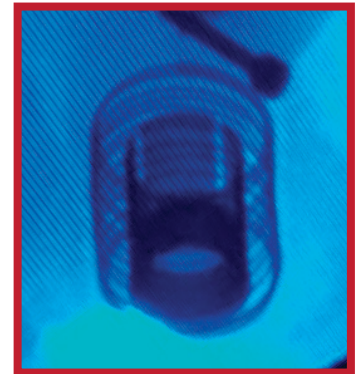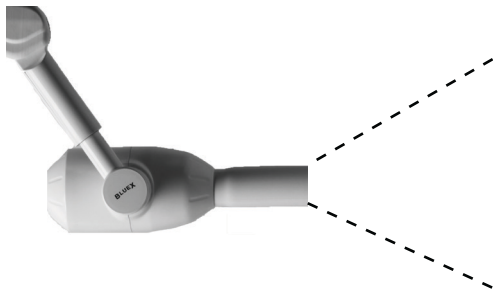

**INCORRECTO** - El dispositivo está inclinado

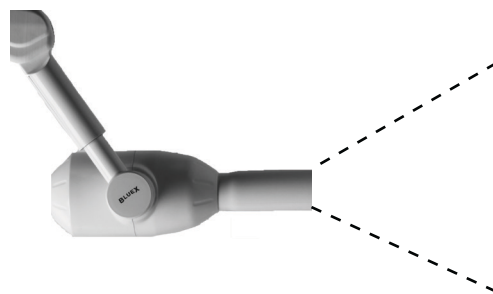

**INCORRECTO** - El dispositivo está inclinado

