

Se ha preparado adecuadamente el dispositivo y está listo para ser desactivado antes del implante.

PREPARACIÓN DEL MANGUITO PARA EL IMPLANTE/DESACTIVACIÓN

El manguito está plano y debe permanecer plano durante todo el proceso de implante.

PASO 1 - OPRIMA Y SUELTE EL BOTÓN DE LA BOMBA HASTA QUE EL MANGUITO ESTÉ PLANO Y QUE EL RESORTE ESTÉ COMPLETAMENTE COMPRIMIDO.

PASO 2 - SAQUE EL PULGAR DEL BOTÓN DE LA BOMBA.

**PASO 3 - VERIFIQUE QUE EL RESORTE ESTÉ COMPLETAMENTE COMPRIMIDO Y QUE ESTÉ AL MISMO NIVEL QUE EL SIGNO MENOS '-'.
PASO 4 - PRESIONE CON FUERZA EL BOTÓN DE DESACTIVACIÓN ANTES DE QUE SE LEVANTE EL RESORTE.**


**PASO 5 - ESPERE 20 SEGUNDOS. COMPRUEBE QUE EL RESORTE SE HA MANTENIDO COMPRIMIDO EN EL SIGNO MENOS '-'.
PASO 6 - ESPERE 20 SEGUNDOS. COMPRUEBE QUE EL MANGUITO ESTÁ PLANO Y QUE EL RESORTE ESTÉ COMPLETAMENTE COMPRIMIDO.**

Guía de imágenes para desactivar el dispositivo antes del implante



1a


Manguito inflado (dispositivo activado)

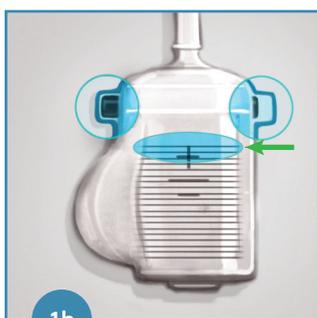

1b


Resorte liberado (dispositivo activado)

**NUESTRO OBJETIVO ES
DESINFLAR EL MANGUITO Y
DESACTIVAR EL ZSI 375
PARA MANTENER EL
MANGUITO PLANO**

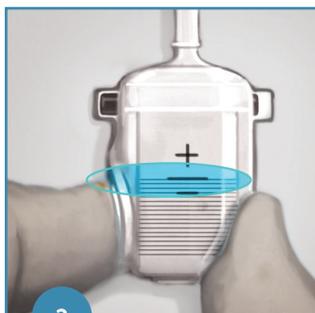

2

Oprima el botón de la bomba. La solución salina irá desde el botón de la bomba hasta el tanque.

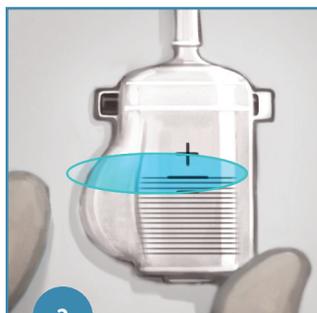


3

Suelte el botón de la bomba. La solución salina irá desde el manguito hasta el botón de la bomba.




4

Repita el proceso oprimiendo el botón de la bomba nuevamente.

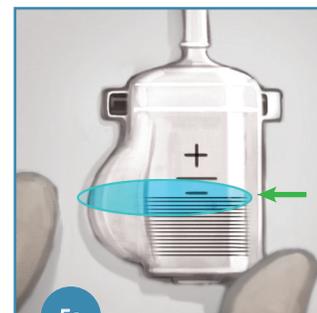


5a

Cuando el resorte está completamente comprimido, no podrá presionar el botón de la bomba.

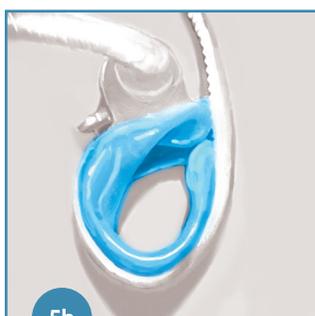


5b

El manguito deberá estar desinflado.

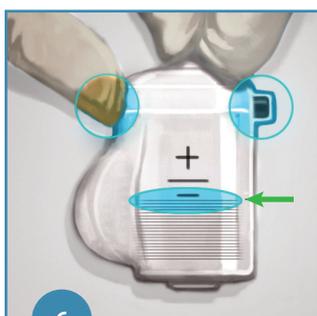


6

Cuando el resorte está al mismo nivel que el signo menos '-', retire el dedo del botón de la bomba y presione con fuerza el botón de desactivación.

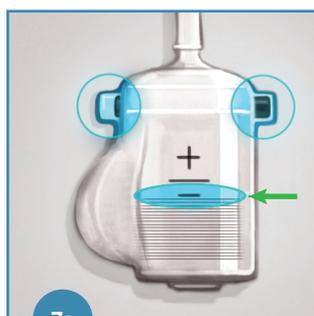

7a

El manguito está plano. El resorte está al nivel del signo menos '-'. Espere 20 segundos y compruebe que el ZSI 375 continúa desactivado.

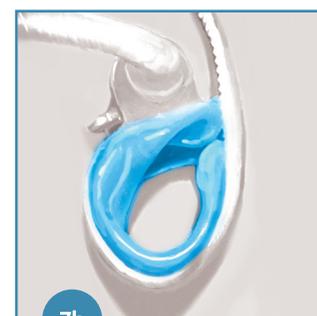

7b

El manguito debe estar desinflado.

El manguito está implantado, se ha activado el dispositivo para ser probado, el resorte está en la posición correcta.

DESACTIVACIÓN DESPUÉS DE IMPLANTAR EL MANGUITO

PASO 1 - OPRIMA Y SUELTE EL BOTÓN DE LA BOMBA HASTA QUE EL RESORTE ESTÉ COMPLETAMENTE COMPRIMIDO.


PASO 2 - SAQUE EL PULGAR DEL BOTÓN DE LA BOMBA.

PASO 3 - VERIFIQUE QUE EL RESORTE ESTÉ COMPLETAMENTE COMPRIMIDO Y QUE ESTÉ AL MISMO NIVEL QUE EL SIGNO MENOS '-'.¹


PASO 4 - PRESIONE CON FUERZA EL BOTÓN DE DESACTIVACIÓN.

PASO 5 - ESPERE 20 SEGUNDOS. COMPRUEBE QUE EL RESORTE SE HA MANTENIDO COMPRIMIDO EN EL SIGNO MENOS '-'.¹


Guía de imágenes para desactivar el dispositivo antes del implante

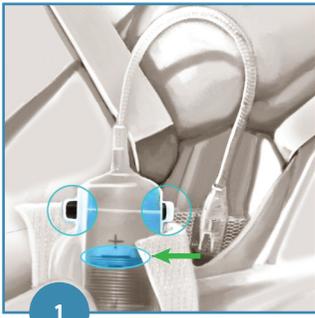



El manguito implantado alrededor de la uretra. El dispositivo está activado y listo para ser probado.

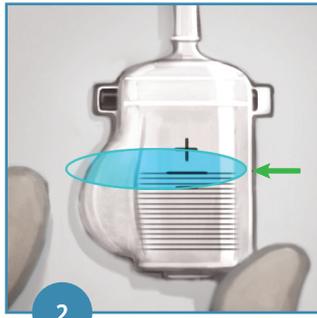

El resorte está al nivel de la línea media. El dispositivo está recibiendo la cantidad de presión adecuada. El dispositivo está listo para ser desactivado.

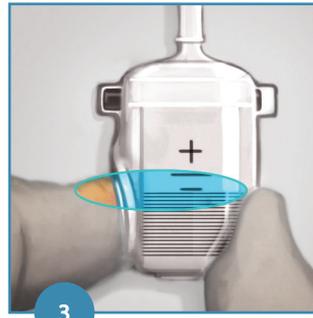


Oprima y suelte una o dos veces. El resorte se tensa totalmente y el manguito está plano. Tenemos que desinflar el manguito y desactivar el ZSI 375 para mantener el manguito desinflado durante el período de cicatrización.

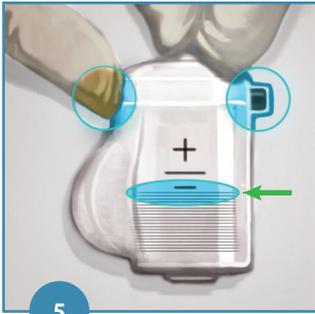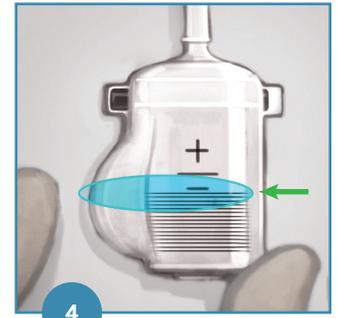

Cuando el resorte está al mismo nivel que el signo menos '-', retire el dedo del botón de la bomba y presione con fuerza el botón de desactivación.

DISPOSITIVO DESACTIVADO

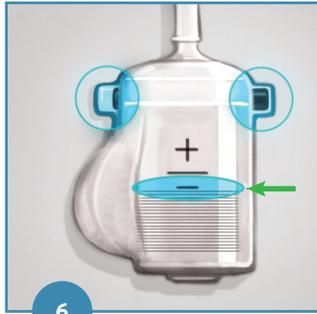

El resorte está debajo del signo menos '-'. Espere 20 segundos para asegurarse de que el ZSI 375 ha sido desactivado correctamente.

DISPOSITIVO CORRECTAMENTE DESACTIVADO

**EL MANGUITO ESTÁ DESINFLADO.
EL DISPOSITIVO ESTÁ DEBIDAMENTE DESACTIVADO.
AHORA PUEDE IMPLANTAR LA BOMBA, SUTURAR LAS ALAS Y AL PACIENTE.**

Es normal que el bulbo del botón de la bomba esté inflado cuando el dispositivo está desactivado.

