




ZSI 100 CF IMPLANT PÉNIEN SOUPLE

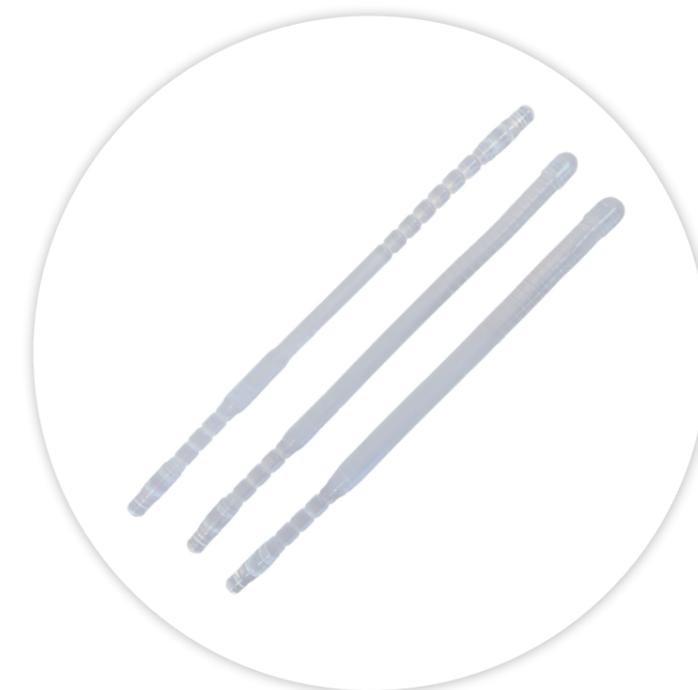


Pour plus d'information
www.zsimplants.ch

Une solution pour la dysfonction érectile neurologique
Un support pour les problématiques de neuro urologie




ZSI 100 CF

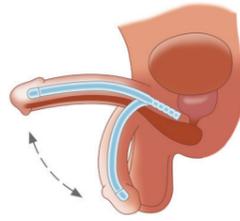


ANATOMIE

Les cylindres de l'implant pénien ZSI 100 CF sont insérés dans les corps caverneux du pénis. Les tissus qui se remplissaient de sang pour obtenir une érection sont écrasés par des dilateurs afin de ménager un espace pour le dispositif. L'implant pénien ZSI 100 CF n'affecte pas la capacité du patient à uriner ou à éjaculer. La sensibilité du gland est respectée, elle n'est pas affectée par l'implant pénien.

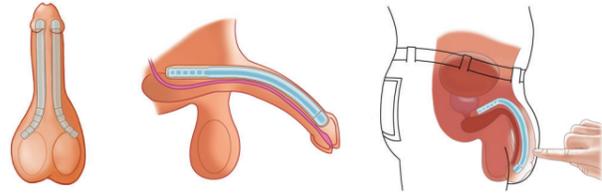


RIGIDITÉ DE L'IMPLANT POUR LES RAPPORTS SEXUELS

Les deux cylindres joints du ZSI 100 CF, disponible en diamètres de 9 à 13cm, présente une rigidité suffisante pour des rapports sexuels satisfaisantes.

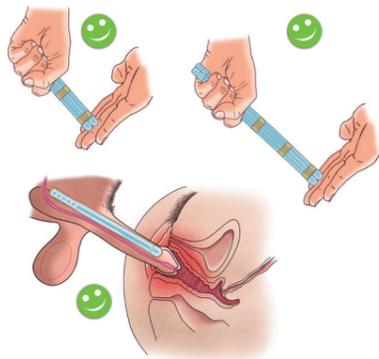


REVÊTEMENT PVP

Le revêtement PVP du ZSI 100 CF associé aux antibiotiques lutte contre les infections.

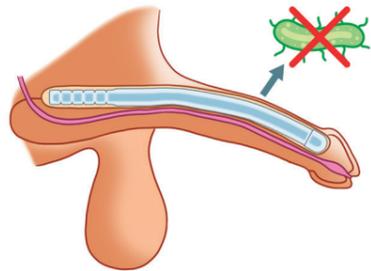


FLEXIBILITÉ DE L'IMPLANT PÉNIEN SOUPLE

Une pression sur un pénis ayant un implant souple, permet d'obtenir une courbure naturelle de ce dernier.

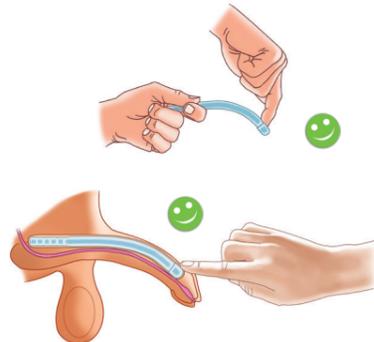


CONFORT DE L'IMPLANT PÉNIEN

Le ZSI 100 CF est flexible, il permet d'avoir un confort optimum.

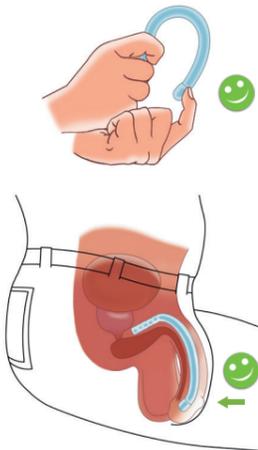

LES IMPLANTS PÉNIENS MALLÉABLES PEUVENT ÊTRE TROP RIGIDES

Les implants péniens malléables, contrairement aux implants péniens souples, peuvent être trop rigides et aboutir à une perforation distale ou proximale des corps caverneux.

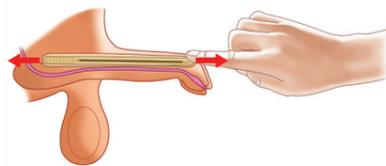

DEMANDEZ À TESTER LE DISPOSITIF

N'hésitez pas à tester le dispositif que vous désirez en suivant les étapes ci dessous.




Testez la flexibilité du dispositif pour évaluer son confort.

Testez la rigidité pour les rapports sexuels. Le test doit toujours se faire avec deux cylindres joints pour obtenir une rigidité suffisante.


RAPPORTS SEXUELS

Les patients présentant un traumatisme ou une maladie de la moelle épinière peuvent présenter une dysfonction érectile secondaire à l'atteinte de circuits neurologiques impliqués dans l'érection. Une paire d'implants souples ZSI 100 CF, insérée dans les corps caverneux, offre une résistance minimale de 500g, qui correspond à la résistance r

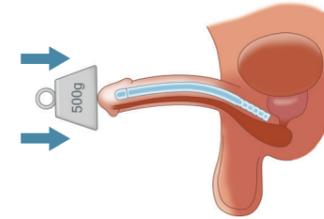


APRÈS LES RAPPORTS SEXUELS

Après un rapport sexuel le pénis est aisément courbé par le slip et le pantalon.

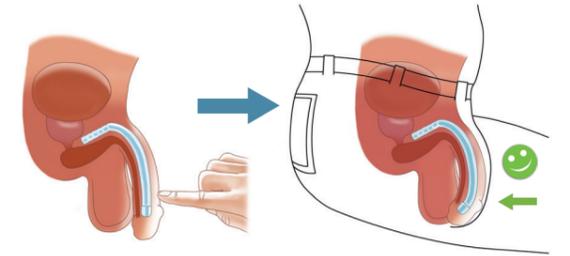


UN SONDAGE INTERMITTENT PLUS FACILE


Les vessies neurologiques sont fréquemment traitées par une sonde à demeure, un sondage intermittent ou un drainage externe. De nombreux patients n'ont pas la dextérité pour réaliser des auto sondages quotidiens qui peuvent mener à des perforations urétrales, surtout si les patients présentent une rétraction du pénis. D'autre part, des sondages intermittents répétés par une autre personne sont généralement mal acceptés. L'implant pénien souple permet d'étendre et d'aligner l'urètre rendant l'auto sondage intermittent plus facile et plus sûr.

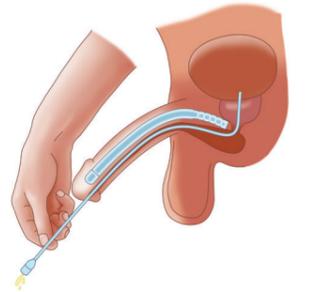


AIDE À MAINTENIR LE DRAINAGE EXTERNE EN PLACE

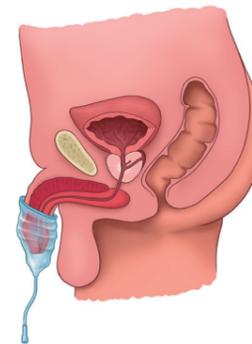

Les vessies neurologiques sont fréquemment traitées par une sonde à demeure, un sondage intermittent ou un drainage externe. L'atrophie pénienne secondaire à la dysfonction érectile chronique, la rétraction pénienne réflexe, la position du bassin rend difficile la tenue des drainages externes. L'obésité peut être un problème supplémentaire en favorisant l'enfouissement partiel du pénis.

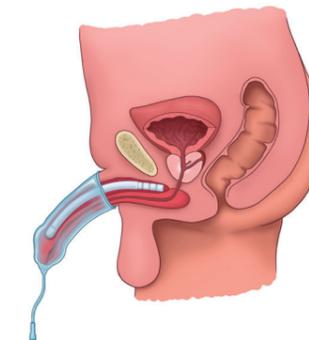

L'implant pénien souple peut être utile pour maintenir le drainage externe sur le pénis. Il permet un placement plus facile et réduit l'incidence des lacérations cutanées nécessitant la mise en place d'un sondage à demeure en attendant la cicatrisation.

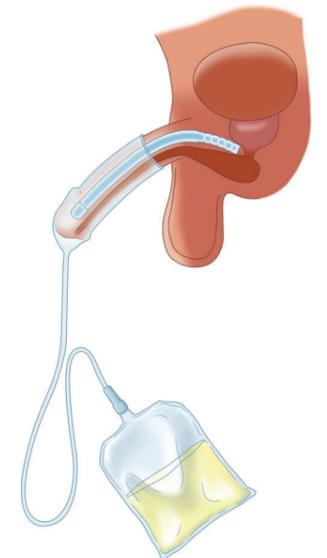

COMPATIBLE AVEC LES IRM ET LES SCANNERS DES AÉROPORTS

Vous pouvez voyager avec le ZSI 100 CF. Fait de silicone, il n'est pas détecté par les scanners des aéroports. Vous pouvez aussi passer un scanner ou une IRM avec votre ZSI 100 CF.

