


# ZSI 200 NS EXPANDER STENT VAGINAL

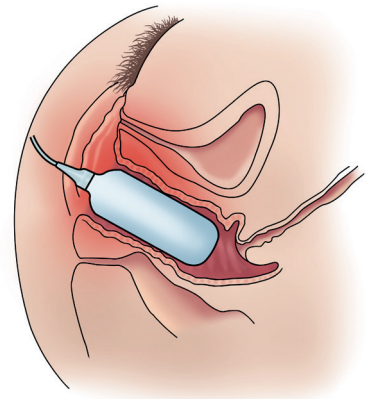

Una solución para usar  
después de una **vaginoplastia o radioterapia**

- Un cilindro inflable, dos tamaños.
- Para más información, visitar **[www.zsimplants.ch](http://www.zsimplants.ch)**


# EL ZSI 200 NS EXPANDER - STENT VAGINAL ESTA DISEÑADO PARA DIFERENTES TAMAÑOS DE VAGINAS

## Porque un expansor vaginal (stent vaginal) después de una vaginoplastia o radioterapia?

Hay un riesgo de estenosis vaginal después de una vaginoplastia o radioterapia vaginal o pélvica.

El expansor vaginal puede permitir disminuir este riesgo.

Causas de la vaginoplastia: anomalías vaginales congénitas, heridas o accidentes, cirugías oncológicas etc.

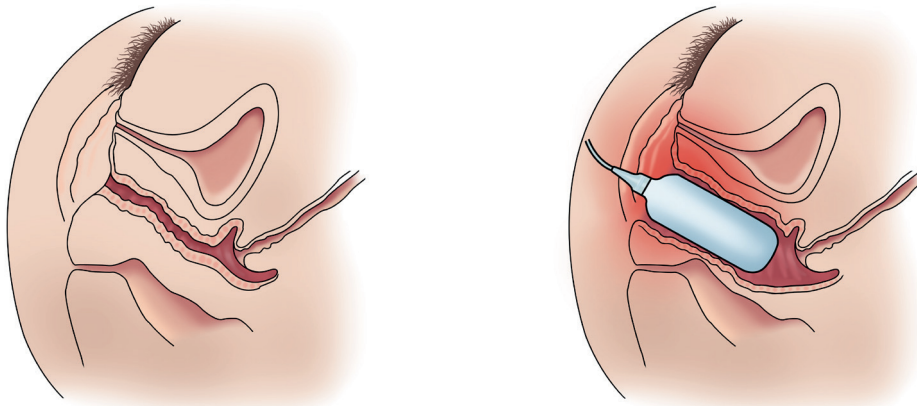

## Descripción

El dispositivo es un cilindro inflable con clamp y conector.

El dispositivo está hecho de silicona biocompatible.

Tamaños disponibles: 90 mm & 120 mm

Diámetro inflado: 40 mm



## Modo de uso

Medir la longitud de la vagina.

Elegir el tamaño adecuado del dispositivo: 90 mm o 120 mm.

Abrir el empaque. Cuidado, no usar objeto contundente.

Introducir el dispositivo en la vagina y llenarlo (90 mm = 100 ml, 120 mm = 130 ml) luego clampear.

Desclampear y vaciar el dispositivo para sacarlo.