


ZSI 200 NS EXPANDER

ENDOPROTHÈSE VAGINALE - STENT VAGINAL

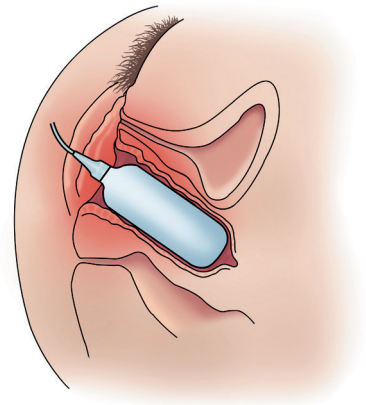


Une solution à utiliser
après une vaginoplastie

- Un cylindre gonflable, deux tailles.
- Pour plus d'information, visiter www.zsimplants.ch

LE ZSI 200 NS EXPANDER - ENDOPROTHÈSE VAGINALE EST CONÇUE POUR S'ADAPTER À TOUTES LES TAILLES DE NEO-VAGIN

Pourquoi une endoprothèse vaginale (vaginal stent) pour les femmes trans?

Après une vaginoplastie, il y a un risque de sténose.
L'endoprothèse vaginale peut diminuer ce risque.

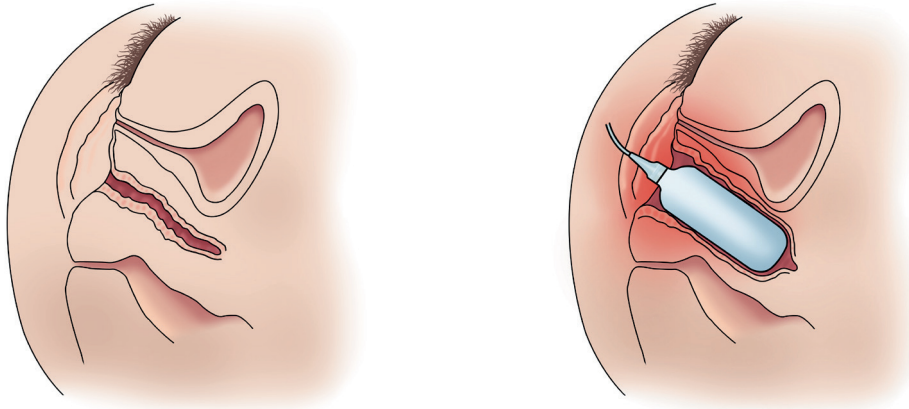

Description

Le dispositif est un cylindre gonflable équipé d'un clamp et d'un connecteur.
Le dispositif est en silicone biocompatible.
Longueurs disponibles: 90 mm & 120 mm
Diamètre gonflé: 40 mm



Mode d'emploi

Mesurer la longueur du vagin. Choisir la taille du dispositif adéquate: 90 mm ou 120 mm.
Ouvrir l'emballage.
Attention, ne pas utiliser d'objet contondant.
Introduire le dispositif dans le vagin et le remplir (90 mm = 100 ml, 120 mm = 130 ml) puis clamper.
Déclamper et vider le dispositif pour le retirer.