


KIT DEL ZSI 100

El kit del ZSI 100 viene con dos rodillos ajustables de 25 cm.

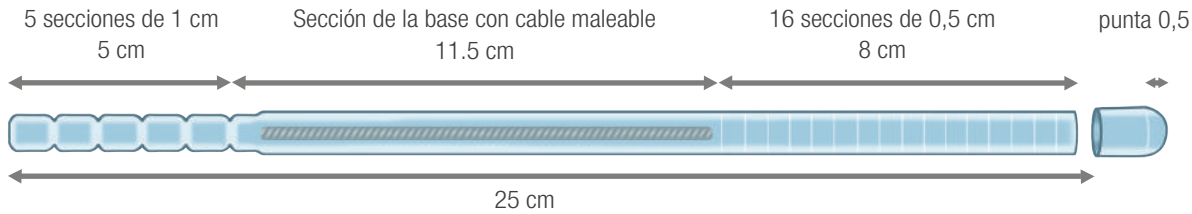

REGLA MEDIDORA

El cirujano deberá solicitar una regla medidora al distribuidor, ya que no está incluida en el kit.




+++ PARA AJUSTAR LA LONGITUD, SIEMPRE CORTE LA PARTE DISTAL PRIMERO +++

Para reducir el tamaño de 25 cm a 17 cm, recuerde cortar primero la parte distal, no la parte proximal.


DISMINUIR EL TAMAÑO DE 25 cm a 17 cm

EJEMPLO 1: ZSI 100 de 19 cm: mida 18,5 cm a partir de la parte proximal, (1) realice el corte en la parte distal y agregue la punta de 0,5 cm = 19cm

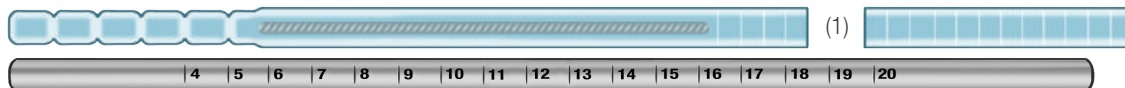

Ejemplo 18.5 cm + copa = 19 cm


EJEMPLO 2: ZSI 100 de 17 cm: mida 16,5 cm a partir de la parte proximal, (1) realice el corte en la parte distal y agregue la punta de 0,5 cm = 17 cm.

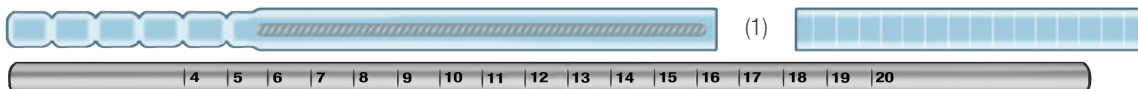

Ejemplo 16.5 cm + copa = 17 cm


TAMAÑO MENOR A 17 cm

EJEMPLO 1: ZSI 100 de 14 cm: (1) primero, corte la parte distal midiendo 13,5 cm desde el extremo distal y (2) realice el corte en la parte proximal y agregue la punta de 0,5 cm = 14 cm.

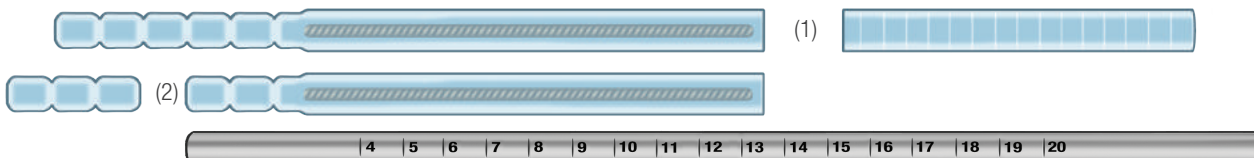

Ejemplo 13.5 cm + copa = 14 cm

EJEMPLO 2: ZSI 100 de 12 cm: (1) primero, corte la parte distal midiendo 11,5 cm desde el extremo distal y (2) realice el corte en la parte proximal y agregue la punta de 0,5 cm = 12 cm.

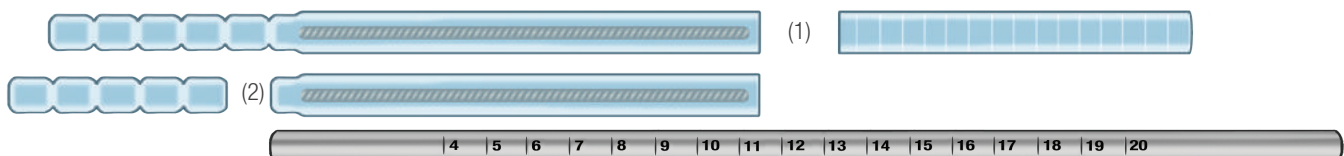


Ejemplo 11.5 cm + copa = 12 cm

MANUAL DE PREPARACIÓN DEL ZSI 100

El kit del ZSI 100 incluye un dispositivo de 25 cm ajustable.

Ejemplo de cómo preparar un ZSI 100 de 25 cm

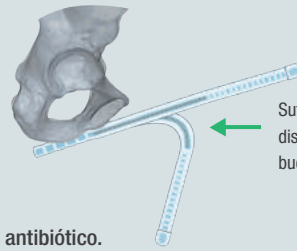

Suficiente cable en el cuerpo cavernoso distal para doblar el dispositivo con buena memoria de forma

*Adjunte la copa cuando el dispositivo esté seco. Después, podrá sumergirlo en antibiótico.


Ejemplo de cómo preparar un ZSI 100



Suficiente cable en el cuerpo cavernoso distal para doblar el dispositivo con buena memoria de forma

*Adjunte la copa cuando el dispositivo esté seco. Después, podrá sumergirlo en antibiótico.

Ejemplo de cómo preparar un ZSI 100 de 17 cm

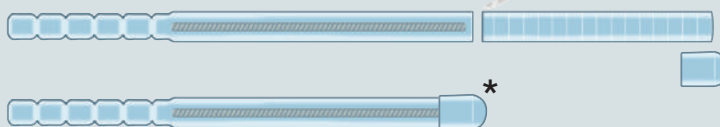

Suficiente cable en el cuerpo cavernoso distal para doblar el dispositivo con buena memoria de forma

* Adjunte la copa cuando el dispositivo esté seco. Después, podrá sumergirlo en antibiótico.

Ejemplo de cómo preparar un ZSI 100 de 12 cm




Suficiente cable en el cuerpo cavernoso distal para doblar el dispositivo con buena memoria de forma

*Adjunte la copa cuando el dispositivo esté seco. Después, podrá sumergirlo en antibiótico.

PRIMERO CORTE LA PARTE DISTAL Y SOLAMENTE SI ES NECESARIO CORTE LA PARTE PROXIMAL PARA AJUSTAR LA LONGITUD

Ejemplo de una preparación incorrecta

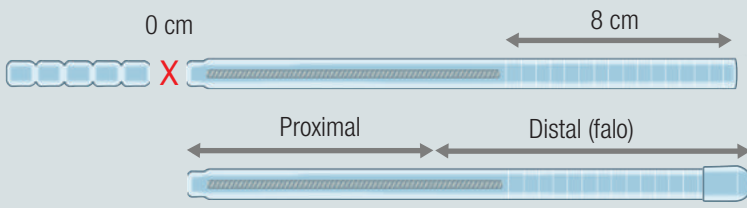

NO CORTE SOLAMENTE LA PARTE PROXIMAL



No hay suficiente cable en el cuerpo cavernoso distal (falo) para doblar el dispositivo. El falo no tiene memoria de forma. La silicona regresa a su posición inicial.

No hay suficiente cable en el cuerpo cavernoso distal (falo) para doblar el dispositivo. El falo no tiene memoria de forma. La silicona regresa a su posición inicial.

Casi todo el cable se ubica en el cuerpo cavernoso proximal entre las piernas