


ZSI 375 PF

ESFÍNTER URINARIO ARTIFICIAL

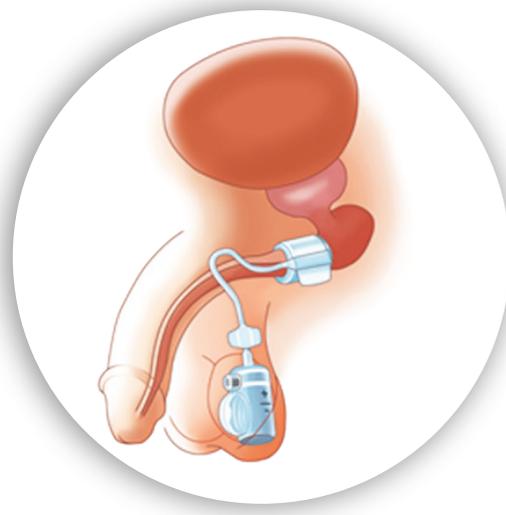

La solución
para la incontinencia masculina

- un manguito ajustable: todas las tallas.
- más información en: www.zsimplants.ch

ZSI es ISO 13485 : 2004 / ZSI 375 está certificado por la UE

Distribuidor Local



ZSI (Zephyr Surgical Implant Sàrl)
C/Ulmann, route des Jeunes 4bis
1227 Les Acacias - Switzerland



Volante, Versión Español
V2 Junio 2016



MANGUITO AJUSTABLE DE 3,5 cm A 5 cm

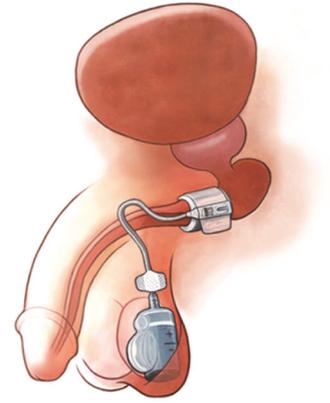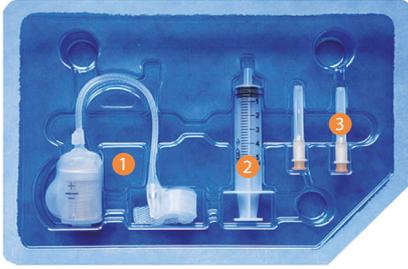

- 1 ZSI 375
- 2 JERINGA DE 5 ML
- 3 AGUJAS HUBER

1 SE ACTIVA CUANDO EL BOTÓN (▼) SOBRESALE AL LADO DEL BOTÓN DE LA BOMBA.



2 TABIQUE DE LA BOLSA DE COMPENSACIÓN

3 TANQUE REGULADOR DE PRESIÓN

4 BOTÓN DE LA BOMBA PARA VACIAR EL MANGUITO (PRESIONAR-SOLTAR)



5 SE DESACTIVA CUANDO EL BOTÓN (▼) SOBRESALE EN EL LADO OPUESTO DEL BOTÓN



6 BOMBA

7 ALAS PARA COSER EL ZSI 375 AL TEJIDO INTERNO DEL ESCROTO




8 MANGUITO AJUSTABLE (3.5 A 5 CM) CON FORMA CURVA




9 TABIQUE DEL CIRCUITO HIDRÁULICO


REALICE UNA RADIOGRAFÍA DEL ESCROTO PARA VERIFICAR LA POSICIÓN DEL RESORTE

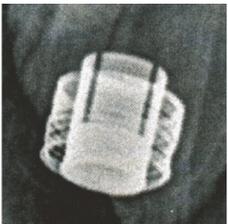

El resorte está comprimido. Se ubica debajo de la parte superior del cilindro. **El ZSI 375 está desactivado.**

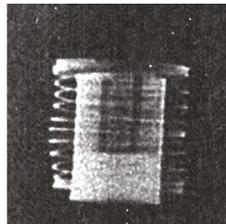

El resorte está en un estado de compresión normal. Se ubica a la misma altura que la parte. **El ZSI 375 está activado.**

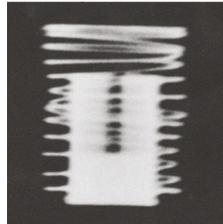

El resorte está completamente descomprimido. La cantidad de solución en el circuito hidráulico es insuficiente.

POSIBILIDAD DE AUMENTO DE LA PRESIÓN INDICADA



FUNCIONAMIENTO

