

A continuación, se detallan los 15 pasos que se debe seguir al implantar el ZSI 375.

1. **INSERTE UN CATÉTER FOLEY CH 16**
2. **REALICE UNA DISECCIÓN.**
3. **PREPARE EL DISPOSITIVO O UTILICE UN ZSI 375 PRERRELLENADO.**
4. **DESACTIVE EL DISPOSITIVO.**
5. **COLOQUE EL MANGUITO TAN APRETADO COMO LO CONSIDERE.**
6. **SUTURE EL MANGUITO.**
7. **QUITE EL CATÉTER FOLEY CH 16.**
8. **ACTIVE EL DISPOSITIVO.**
9. **REVISE LA POSICIÓN DEL RESORTE. AJUSTE EL VOLUMEN DE SOLUCIÓN SALINA SEGÚN SEA NECESARIO.**
10. **DESACTIVE EL DISPOSITIVO.**
11. **INSERTE LA BOMBA.**
12. **INSERTE UN CATÉTER FOLEY CH 12. DEBE MANTENERLO DURANTE 24 HORAS.**
13. **SUTURE.**
14. **COLOQUE UNA ETIQUETA ADHESIVA DE SEGUIMIENTO EN EL FORMULARIO DEL PACIENTE (INCLUIDA EN EL BLISTER).**
15. **ENVÍELE EL FORMULARIO COMPLETO AL PACIENTE CON LA ETIQUETA ADHESIVA DE SEGUIMIENTO.**

Esta es una lista complementaria a los pasos tal como se presentaron en el Manual de la Sala de Operaciones.