


LECTURA DE UNA PLACA DE RAYOS X

Parte superior
del cilindro

Parte superior
del resorte

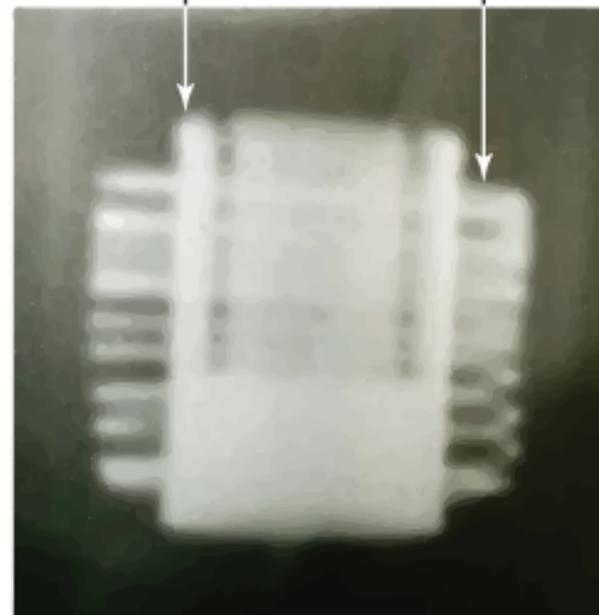

En una placa realizada correctamente, el dispositivo se verá así. Cuando el dispositivo está desactivado, el resorte se ve como se muestra en la imagen.

Si el resorte está en cualquier otra posición, a la altura del cilindro o por encima de él, el dispositivo no se ha desactivado correctamente.

Siga los pasos de desactivación del dispositivo una vez más.

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Nombre: _____

Dirección: _____

Contacto de emergencia: _____

Tipo de sangre del paciente: _____

Enfermedades preexistentes:




NOTA DE ADVERTENCIA *para médicos*

Este paciente tiene implantado un Esfínter Urinario Artificial ZSI 375. Antes de realizar cualquier intervención, se deberá desactivar el dispositivo (las instrucciones de desactivación están en el interior de esta tarjeta).

La realización de cualquier intervención invasiva al paciente sin antes desactivar el dispositivo ZSI 375 puede causar daños graves al paciente y/o al dispositivo.


www.zephyr-si.com

DESACTIVACIÓN DEL DISPOSITIVO

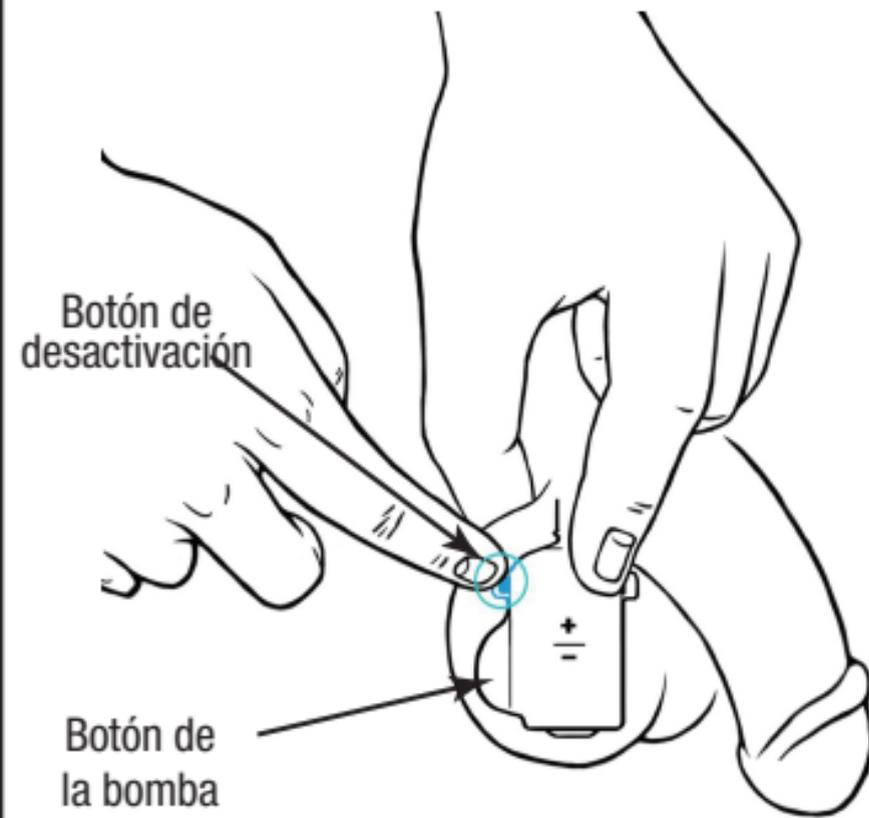


Sostenga el dispositivo en una mano.
Presione y suelte el botón de la bomba dos veces.
Presione con fuerza el botón de desactivación.
Ubicado justo encima del botón de la bomba.

ACTIVACIÓN DEL DISPOSITIVO

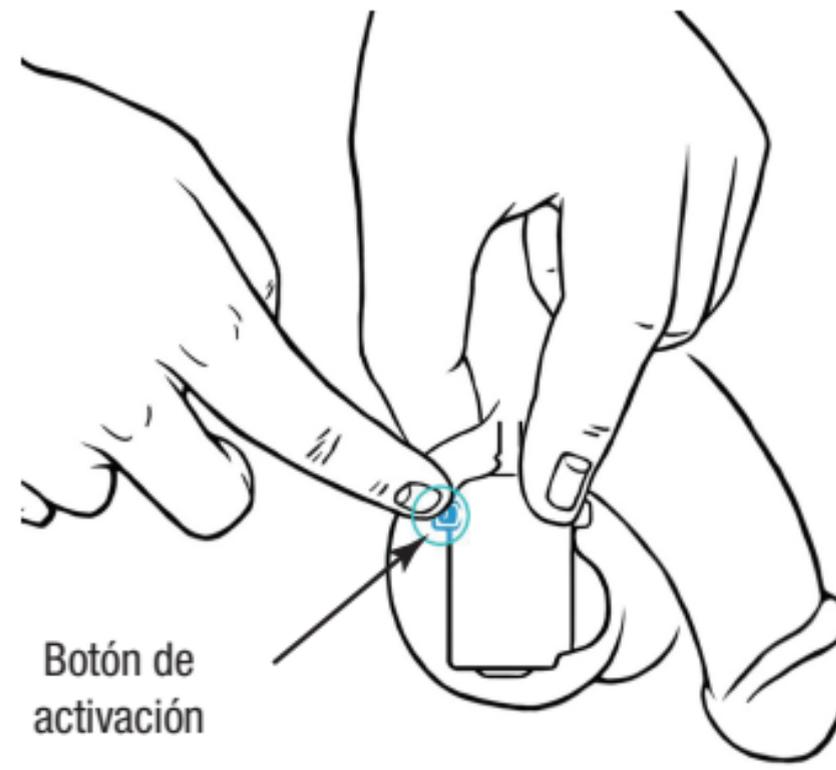

Presione con fuerza el botón de activación.
El botón de activación está en el extremo opuesto al botón de desactivación y al botón de la bomba.

TOMA DE UNA PLACA DE RAYOS X

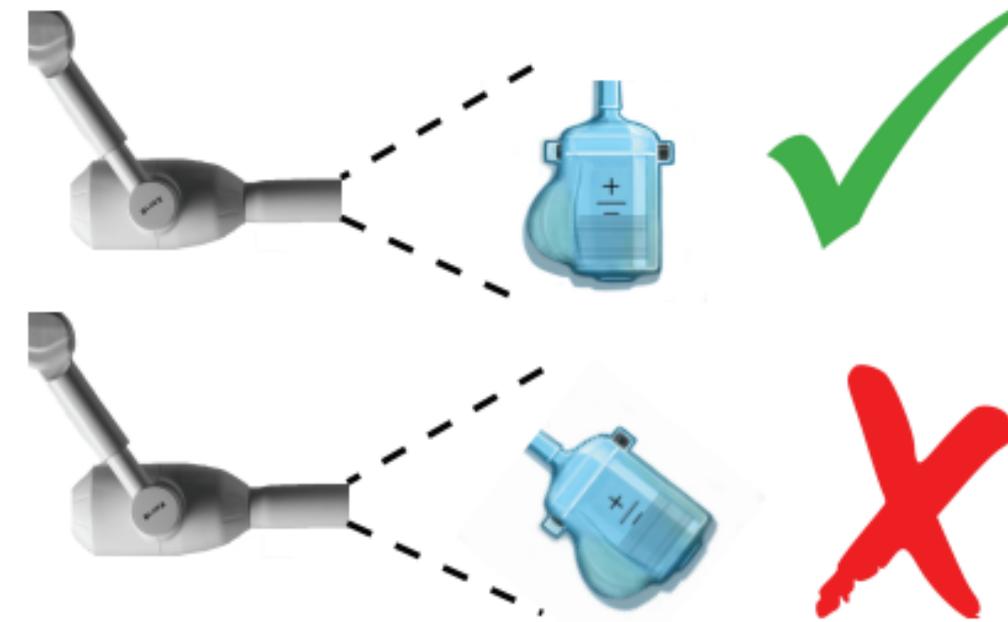

El dispositivo debe ser fotografiado en un perfil de cuarto claro.
Si el dispositivo llegara a inclinarse, la imagen será ilegible.